


Hinweise zum Betrieb des boso-profilmanager3 mit der Datenbank „Firebird“ unter dem Betriebssystem Microsoft-Vista

sowie

Hinweise zum Betrieb im Netzwerk bei aktiver Firewall:

- 1.) Bei der Installation von Firebird installieren Sie bitte **kein** Symbol im Infobereich der Taskleiste. Bitte entfernen Sie hierzu die Markierung aus folgender Box:

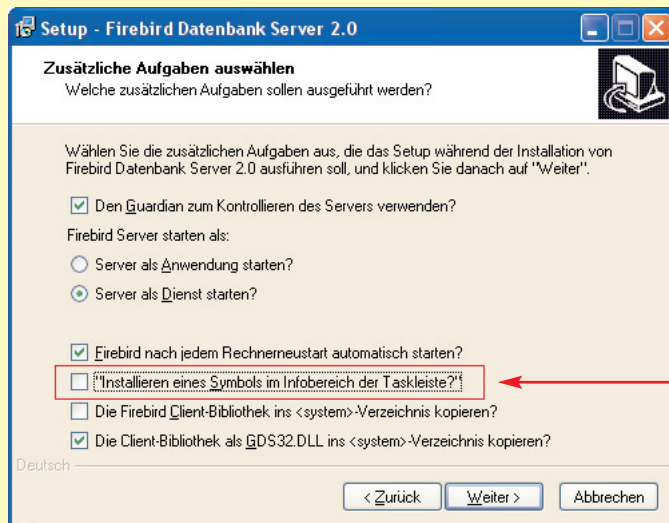

Hintergrund:

Firebird legt beim Installieren dieses Symbols im Infobereich der Taskleiste folgende Datei an:

C:\Windows\System32\Firebird2Control.cpl

Diese Datei blockiert die korrekte Funktion der Systemsteuerung unter Microsoft Vista.

Sollte die Installation ohne Entfernen der Markierung bereits durchgeführt worden sein, löschen Sie diese Datei. Die Systemsteuerung ist dann wieder wie gewohnt verfügbar.

- 2.) Beim Start des boso-profilmanager3 unter Microsoft Vista achten Sie bitte darauf, dass dieser als **Administrator** gestartet wird (rechte Maustaste auf das Icon der Anwendung --> Als Administrator ausführen). Abhängig von den mit Ihrem Benutzerprofil verknüpften Rechten können sonst eventuell Probleme bei der Verbindung mit der Firebird Datenbank auftreten.



- 3.) Beim Betrieb im Netzwerk ist darauf zu achten dass bei aktiver Firewall auf dem Server der TCP-Port 3050 freigeschaltet ist, da sonst ebenfalls Probleme bei der Verbindung auftreten können:

