


# Upgrade der ABI-Software von Version 1 auf Version 2

[Dieser erste Schritt ist nur bei einer Netzwerkinstallation notwendig:]

- Firebird 1.5 bzw. 2.0 über die Systemsteuerung → Software [bei Vista und WIN7: Programme und Funktionen] deinstallieren]

## Für alle Installationen:

- Sichern Sie die Datenbank „ABI.fdb“ aus dem Verzeichnis C:\programme\abi
- Legen Sie die CD der Version 2 ein und folgen dem Bildschirmdialog.
- Kopieren Sie die gesicherte Datenbank in das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\boso\abi\ [bei Vista und WIN7: C:\Program Data\boso\abi\]
- Starten Sie das Programm. Beim ersten Start erscheint die Abfrage, ob Sie Ihre Datenbank an das neue Datenformat anpassen wollen.

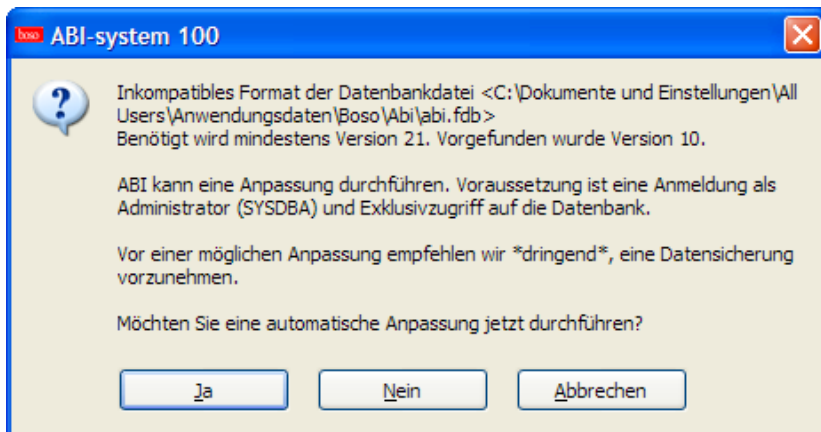

Führen Sie die Anpassung durch, indem Sie die Abfrage mit „Ja“ bestätigen.

Ihre neue Version ist jetzt mit Ihren bisherigen Daten voll funktionsfähig.