

Verzeichnispfade für die Installation der Profimanager Software (Alle Versionen)

Installationspfad des Programms („START.exe“ oder „Profman24.exe“)			
	WIN 2000 / XP	Windows Vista und höher 32 – Bit - Versionen	Windows Vista und höher 64 – Bit - Versionen
Profman2	C:\Programme\Profman\START.exe	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Profman3.1	C:\Programme\Profman3\START.exe	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Profman3 Version ab 3.2	C:\Programme\Profman3\START.exe	C:\Programme\Profman3\ START.exe	C:\Programme(x86)\Profman3\ START.exe
Profman XD Version 4.1.0	C:\Programme\Boso\ProfmanXD\ profmanXD.exe	C:\Programme\Boso\ProfmanXD\ profmanXD.exe	C:\Programme\Boso\ ProfmanXD\profmanXD.exe
*Programme(x86) : 64-Bit-Betriebssysteme, Installationsort für 32-Bit-Programme			
Installationspfad der Konfigurationsdatei („Profman.ini“/“ profmanXD.ini “)			
	WIN 2000 / XP	Windows Vista und höher 32 – Bit - Versionen	Windows Vista und höher 64 – Bit - Versionen
Profman2	C:\Programme\Profman\Data\Profman.ini	n.V	n.V
Profman3.1	C:\Programme\Profman3\Data\Profman.ini	n.V	n.V
Profman3 Version ab 3.2	C:\Dokumente und Einstellungen\ All Users\Anwendungsdaten\Boso\ Profman\Profman.ini	C:\Program Data\Boso\ Profman\Profman.ini	C:\Program Data\Boso\ Profman\Profman.ini
Profman XD Version 4.1.0 profmanXD.ini	C:\Programme\Boso\ProfmanXD\ profmanXD.ini	C:\Programme\Boso\ProfmanXD\ profmanXD.ini	C:\Programme\Boso\ ProfmanXD\profmanXD.ini
*profmanXD.ini (Konfigurationseinstellungen) : Diese Datei wird nur bei der Installation der Netzwerkversion erzeugt, der Speicherpfad wird vom Anwender frei bestimmt, es existiert kein Standard-Pfad			

Verzeichnispfade für die Installation der Profilmanager Software (Alle Versionen)

Installationspfad der Datenbank (Profilmanager2 : „Data“, Profilmanager3 : „boso_tm+pm.gdb“, Profilmanager XD : „profman.fdb“)			
	WIN 2000 / XP	Windows Vista und höher 32 – Bit - Versionen	Windows Vista und höher 64 – Bit - Versionen
Profman2	C:\Programme\Profman\Data	n.V	n.V
Profman3.1	C:\Programme\Profman3\Data	n.V	n.V
Profman3 Version ab 3.2	C:\Dokumente und Einstellungen\ All Users\Anwendungsdaten\Boso\ Profman\boso_tm+pm.gdb	C:\Program Data\Boso\ Profman\boso_tm+pm.gdb	C:\Program Data\Boso\ Profman\boso_tm+pm.gdb
Profman XD Version 4.1.0	C:\Dokumente und Einstellungen\ All Users\Anwendungsdaten\Boso\ ProfmanXD\profman.fdb	C:\Program Data\Boso\ profman.fdb	C:\Program Data\Boso\ profman.fdb

Achtung

Bei Verwendung des Windows Betriebssystems Win VISTA oder höher ist häufig die Menüleiste des Windows Dateie Explorers ausgeblendet, wichtige Verzeichnisse (siehe Tabelle) sind deshalb nicht sichtbar. Bei Bedarf gemäß der Schritte 1 und 2 verfahren.

Bei Verwendung des Windows Betriebssystems Win 98SE2 oder höher bis einschließlich Win XP ist bei Bedarf wie unter Schritt 2 beschrieben zu verfahren, Schritt 1 entfällt.

Die Windows Menüleiste einblenden.

Schritt 1 : In der Explorerleiste das Menü „Organisieren“ öffnen => „Layout“ öffnen => „Menüleiste“ auswählen.

Die ausgeblendeten Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen lassen.

Schritt 2 : In der Windows Menüleiste „Extras“ => „Ordneroptionen“ => „Ansicht“ anklicken, dann die Markierung auf „Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen“ setzen, übernehmen und bestätigen.

Installationsvorgänge

Deinstallation einer Vorgängerversion vor der Installation einer aktuellen Programmversion

Achtung : Bei der Deinstallation des „Profilmanagers“ werden die Datenbank und die Konfigurationsdatei unwiderruflich gelöscht. Fertigen Sie deshalb vor der Deinstallation unbedingt eine Sicherungskopie der Datenbank und der Konfigurationsdatei an. (Siehe Speicherpfad in der Tabelle)

Überinstallieren einer neuen Programmversion über eine Vorgängerversion.

Achtung : Bei der Installation einer aktuellen Programmversion über eine Vorgängerversion werden die Datenbank und die Konfigurationsdatei häufig unwiderruflich gelöscht. Fertigen Sie deshalb vor der Deinstallation unbedingt eine Sicherungskopie der Datenbank und der Konfigurationsdatei an. (Siehe Speicherpfad in der Tabelle)