

Treiberinstallation Windows 8.1 (64 Bit) zur Inbetriebnahme des boso TM-2450

1. Ordner „D:\Driver\TM2450\Win8\64Bit\“ öffnen
2. Rechtsklick auf „boso.cer“ -> Zertifikat installieren (siehe Abb. 1)

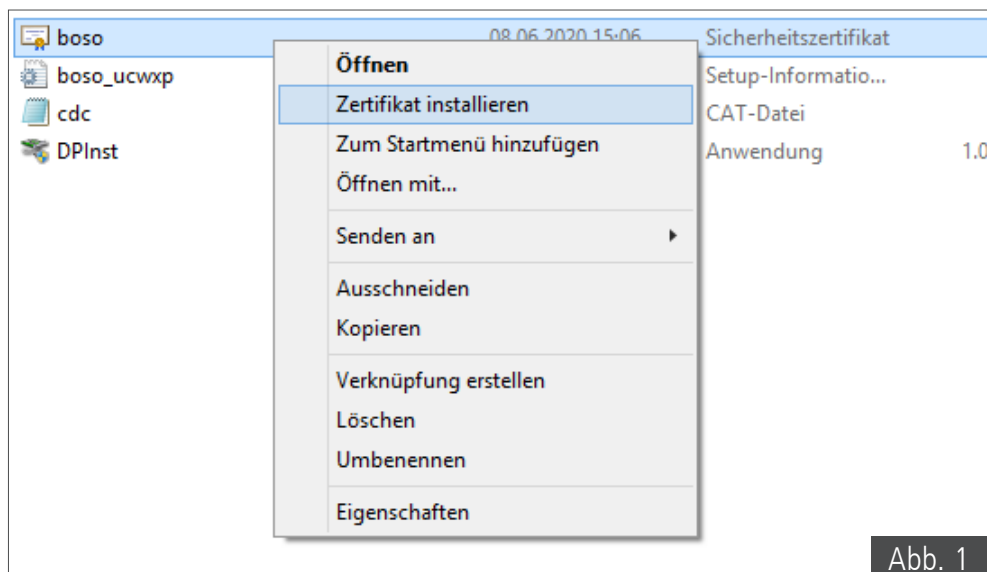


Abb. 1

Im „Willkommen“-Fenster „Lokaler Computer“ auswählen (siehe Abb. 2)



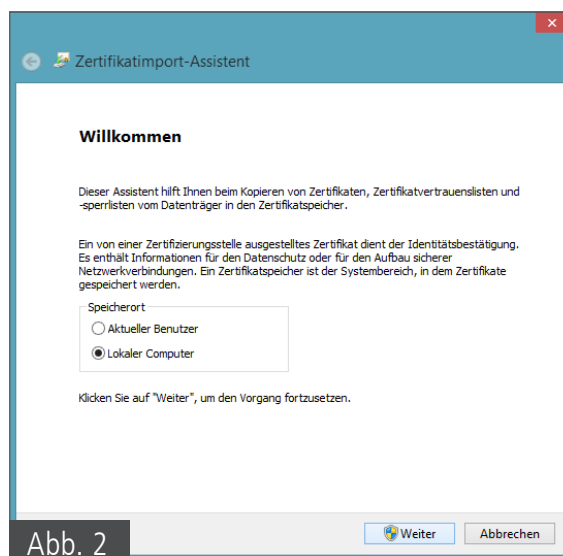


Abb. 2


3. „Weiter“
4. Im „Zertifikatspeicher“-Fenster auf „Durchsuchen“ klicken

5. „Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen“ auswählen, mit „OK“ bestätigen (siehe Abb. 3)

6. „Weiter“ (siehe Abb. 4)

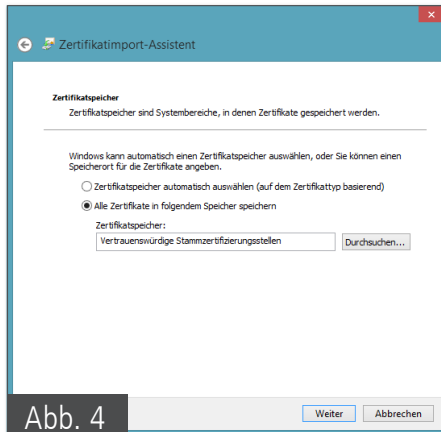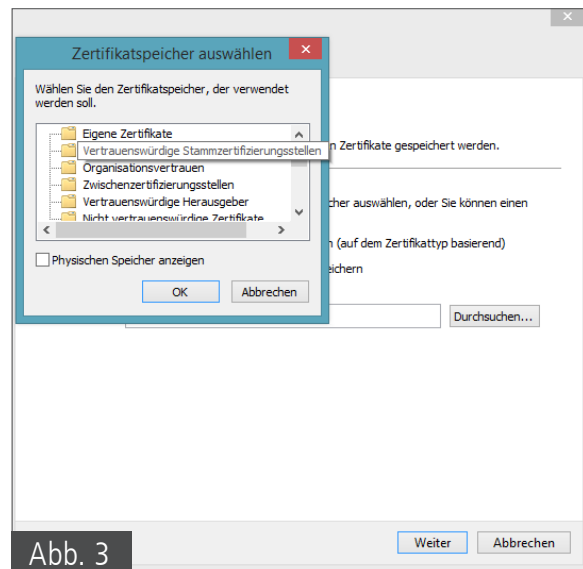

7. „Fertig stellen“ (siehe Abb. 5)

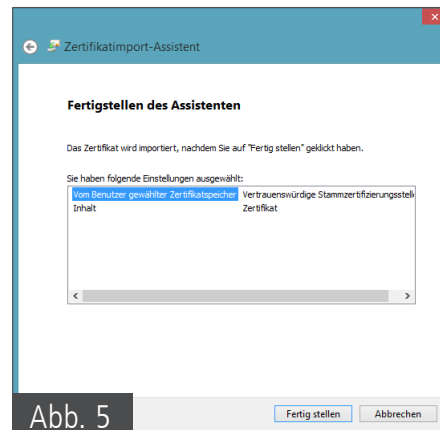

8. Fenster „Importvorgang war erfolgreich“ erscheint
9. Rechtsklick auf DPInst -> als Administrator ausführen
10. Im „Willkommen“-Fenster „Weiter“ klicken (siehe Abb. 6)
11. „Fertig stellen“

Treiber ist installiert

Treiberinstallation Windows 8.1 (32 Bit)

1. Ordner D:\Driver\TM2450\Win8\32Bit\ öffnen
2. Rechtsklick auf DPInst -> als Administrator ausführen
3. Im „Willkommen“-Fenster „Weiter“ klicken
4. „Fertig stellen“

Treiber ist installiert

