


Update profil-manager XD ab Version 5.0 auf Version 6.0


1. Datenbankdatei sichern (z.B. auf USB-Stick)
Der Pfad der Datenbankdatei wird hier angezeigt (Abb. 1, Pfeil 2)

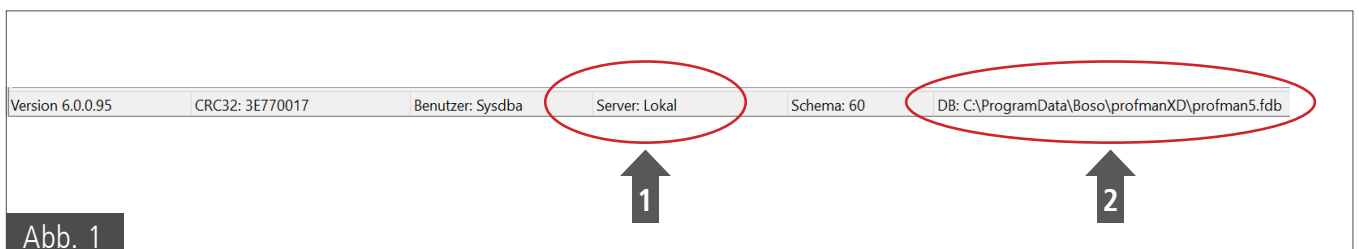

2. Installation profil-manager XD Version 6.0
Einzelplatzversion „Server: Lokal“ (Abb. 1, Pfeil 1)
Ausführen von „profmanxd_setup.exe“ von der CD-ROM

Dem Installationsdialog folgen bis die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde.

3. profil-manager XD starten
4. Folgende Meldung wird angezeigt

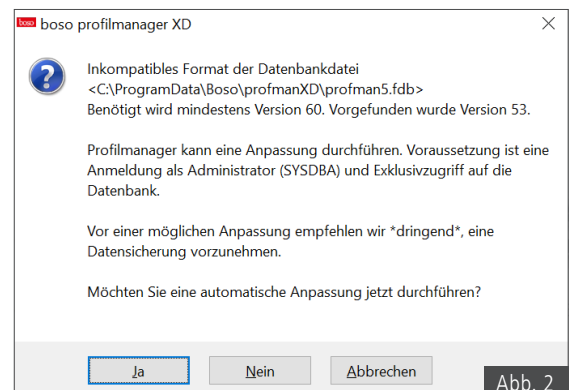

5. Mit „Ja“ bestätigen (Abb. 2)
Der profil-manager XD führt nun eine automatische Anpassung der Datenbank durch.

 Zu beachten bei 24h-Messung
Schnittstelleneinstellungen prüfen (siehe Abb. 3)

Alle Daten und Einstellungen wurden übernommen.

