


Alle Funktionen auf einen Blick.

EINER WIE
KEINER
boso
medicus
exclusive

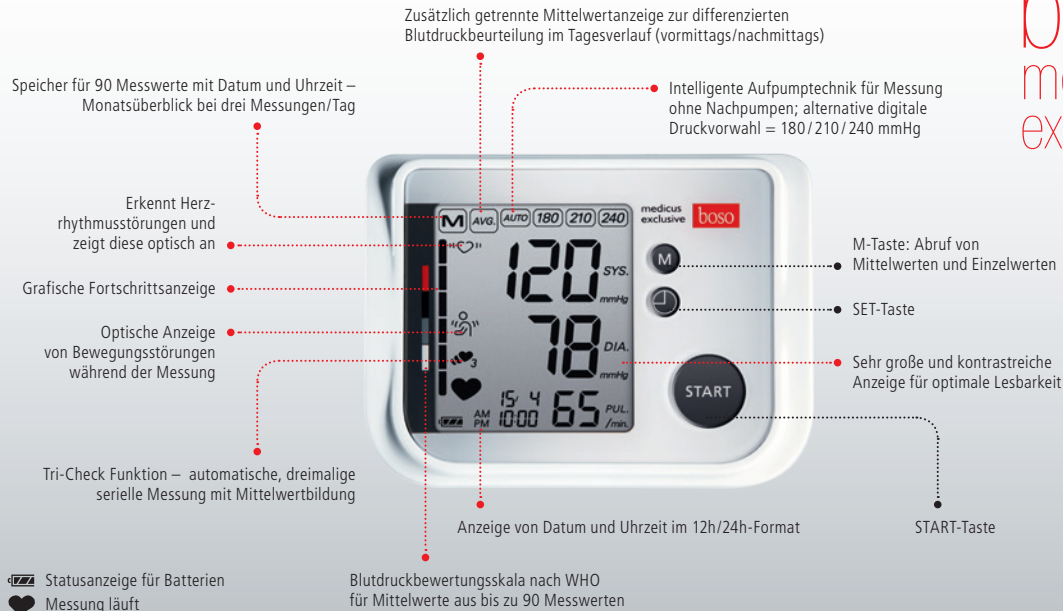

- Zuschaltbare Sprachausgabe in 5 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Gastmodus für Messungen, die nicht gespeichert werden sollen


Premium-Qualität für die Gesundheit

boso
BOSCH + SOHN
GERMANY

Einfach programmieren: boso medicus exclusive



- Wählen oder bestätigen: SET-Taste
- Änderung des jeweiligen Parameters durch Betätigung der START-Taste

1. Einstellung aktuelles Jahr	Drücken Sie einmal die SET-Taste, ändern Sie die Jahreszahl durch Drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
2. Einstellung aktueller Monat	Ändern Sie den Monat durch drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
3. Einstellung aktueller Tag	Ändern Sie den Tag durch drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
4. Einstellung aktuelle Stunde	Ändern Sie die Stunde durch drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
5. Einstellung aktuelle Minute	Ändern Sie die Minute durch drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
6. Einstellung 12h- oder 24h-Anzeige	Grundeinstellung 24h Ändern Sie wenn gewünscht den Uhrzeitmodus von 24h auf 12h oder OFF (hier wird keine Uhrzeit angezeigt) durch Drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste. (z.B. 12h = 5:32 Uhr Nachmittag oder 24h = 17:32 Uhr Nachmittag).
7. Einstellung der Aufpumphöhe	Grundeinstellung AUTO Ändern Sie wenn gewünscht die Aufpumphöhe von AUTO auf 180, 210, 240 durch Drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste. (AUTO = automatische Wahl der Aufpumphöhe oder Festwert 180, 210, 240 mmHg).
8. Einstellung erweiterter Messablauf 	Grundeinstellung OFF Aktivieren Sie wenn gewünscht den erweiterten Messablauf durch Drücken der START-Taste von „OFF„ auf „on“ und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste. (erweiterter Messablauf = Durchführung von drei aufeinanderfolgenden Messungen bei Einstellung „on“).
9. Einstellung der Sprachlautstärke	Grundeinstellung off = ohne Sprachausgabe Ändern Sie wenn gewünscht die Einstellung der Sprachlautstärke durch Drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste. Durch mehrmaliges Drücken der START-Taste wird die Lautstärke verändert.
10. Auswahl der Sprache	Grundeinstellung L1 = Deutsch Ändern Sie wenn gewünscht die Auswahl der Sprache durch Drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste. (L1 = Deutsch, L2 = Englisch, L3 = Französisch, L4 = Italienisch, L5 = Spanisch).
Menü verlassen / Beenden der Einstellungen	Drücken Sie die SET-Taste so oft bis keine Displayanzeige mehr zu sehen ist oder bis Sie wieder beim gewünschten Einstellparameter sind.